


Odběr krve systémem BD Vacutainer®

Doporučené pořadí zkumavek při odběru:


1. Zkumavka bez aditiv

2. Koagulační zkumavka


3. Jiné zkumavky s aditivy

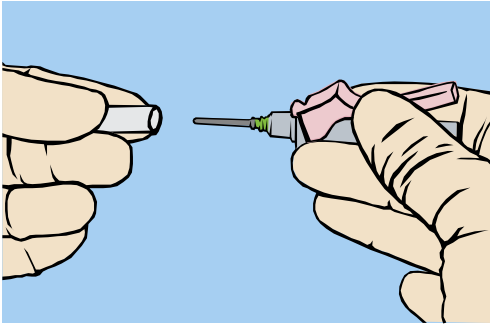


Obr. 1
Zkontrolujte, je-li papírová plomba jehly BD Eclipse™ neporušená, tzn. sterilní. Je-li porušena, jehlu nepoužívejte. Uchopte barevnou část ochranného krytu jehly BD Eclipse™ do jedné ruky, otočením sundejte bílý ochranný kryt a vyhodte jej.

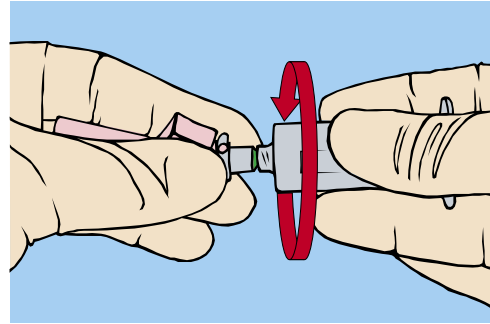


Obr. 2
Zašroubujte BD Eclipse™ jehlu do držáku na jedno použití. Připravte místo pro vpich. Odklopte růžový bezpečnostní kryt a sundejte barevný kryt jehly.

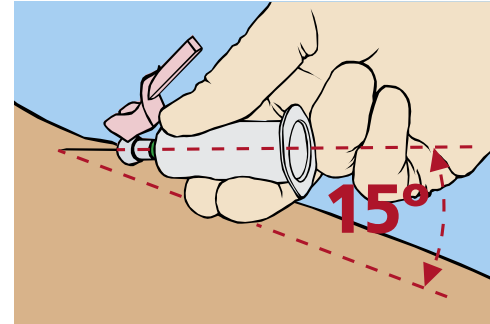


Obr. 3
Bezpečnostní uzávěr v horní pozici ukazuje správné natočení hrotu jehly BD Eclipse™. Proveďte vpich obvyklým způsobem na paži ve svislé pozici.

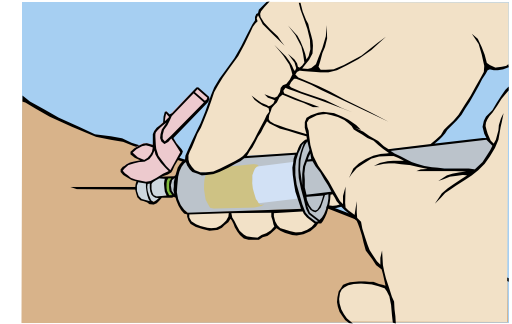


Obr. 4
Zaveďte zkumavku BD Vacutainer® do držáku. Položte svůj ukazováček a prostředník na obrubu držáku a palec na konec zkumavky, zatlačte zkumavku až do konce držáku, propíchněte uzávěr. Uvolněte škrtdlo ihned jak začne krev natékat do zkumavky nebo tak učiňte do 1 minuty.

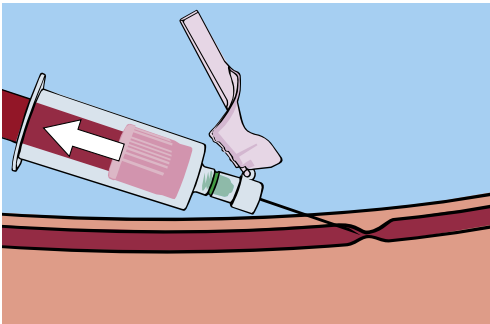


Obr. 5
Když se vakuum vyčerpá a tok krve ustane, jemně táhněte zkumavku k obrubě držáku, uvolněte uzávěr zkumavky z jehly a vytáhněte zkumavku z držáku. Při odběru do více zkumavek opakujte krok 4.

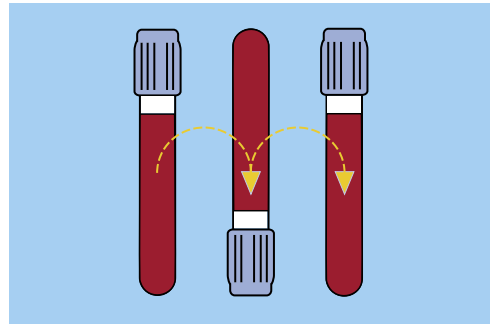

Obr. 6
Zatímco krev natéká do dalších zkumavek, jemně převracejte již naplněné zkumavky s aditivem (včetně BD SST™ II Advance) 3 až 10x, aby se krev s aditivem promíchala. Netřepajte. Silné míchání může způsobit hemolýzu. Vytáhněte poslední zkumavku z držáku ještě před vyjmutím jehly ze žíly.

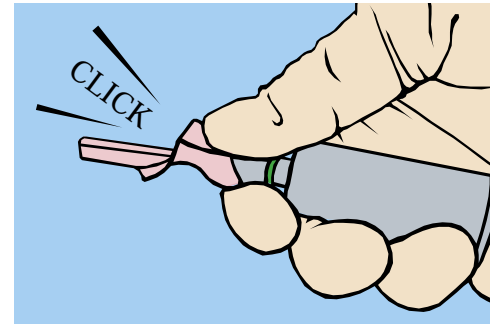

Obr. 7
Okamžitě po vyjmutí jehly BD Eclipse™ ze žíly pomocí "techniky jedné ruky" nakloňte jehlu nahoru a palcem tlačte růžový bezpečnostní kryt přes jehlu, až uslyšíte zaklapnutí.

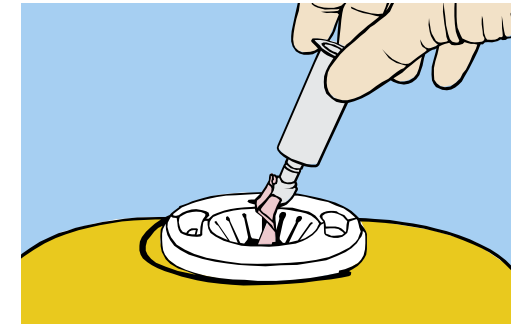

Obr. 8
Držák na jedno použití s jehlou BD Eclipse™ okamžitě po ukončení odběru vyhodte do odpadového kontajneru na jehly.